

Blutabnahme bei Neugeborenen (Trockenblutkarte)

ANLEITUNG


1a Blutentnahme aus der Ferse (Neugeborene)

- Ferse reinigen und ggf. mit Alkohol oder Isopropanol desinfizieren, kein anderes Desinfektionsmittel verwenden.
- Ggf. Ferse massieren oder erwärmen, handelsübliche Stechhilfen (Sicherheits-Lanzetten mit breiter Schnittfläche) verwenden.
- Ferse seitlich punktieren, ersten Blutstropfen mit sauberem Tupfer abwischen.
- Tropfen auf die vorgedruckten Kreise der Trockenblutkarte tropfen, ohne dass Karte und Ferse sich berühren.
- Für das Neugeborenen-Screening 5 - 7 Kreise mit Blut befüllen.



1b Alternativ: Blutentnahme aus der Vene

Venöse Blutentnahme darf nur durch medizinisches Fachpersonal ausgeführt werden. Hygienische und medizinische Vorgaben sind zu beachten. Nativblut direkt aus dem Entnahmesystem auf die Trockenblutkarte tropfen lassen oder mit Pipette aus dem Entnahmeröhrchen auftropfen. Keine Zusätze (EDTA, Heparin u. a.) verwenden.

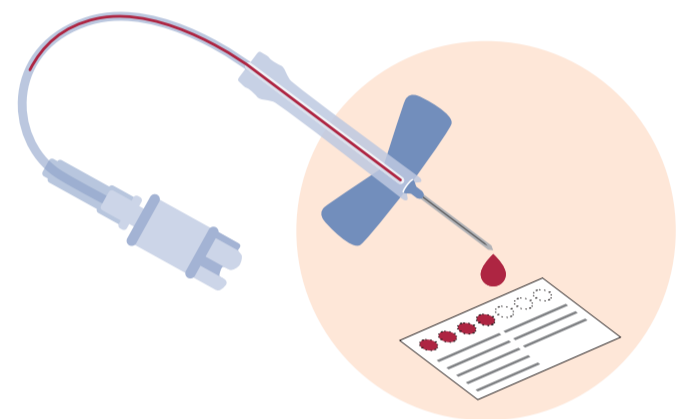

Achtung: Das Blut muss so aufgetropft werden, dass die Kreise möglichst vollständig ausgefüllt sind. Das Blut muss durch die Karte gut durchgezogen sein (Karte sieht beidseits annähernd gleich gut betropft aus). Blut nur von einer Seite auf die Karte geben. Mehrfaches Auftragen von Blut vermeiden (Überladung). Kein Nabelschnurblut verwenden! Blut nicht aus liegenden Zugängen entnehmen!



2 Trocknung

Trocknung über mindestens 2 - 4 Stunden bei Raumtemperatur.
Karte aufrecht/schräg an einen Gegenstand angelehnt stellen.
Karte NICHT durch Heizung, Föhn oder unter Sonneneinstrahlung trocknen!



3 Vorbereitung zum Versand

- Einsendeschein, Trockenblutkarte vollständig ausfüllen.
- Elterneinwilligung auf korrekte Unterschriften kontrollieren, verbleibt in der Patientenakte, Kopie den Eltern geben.
- Einsendeschein, Karte u. ggf. Laborüberweisung in einen Briefumschlag packen, ausreichend frankieren und schnell absenden.
- Briefkästen mit starker Sonneneinstrahlung oder Kälteeinwirkung vermeiden, Leerzeiten beachten. Aufgabe in Postfiliale oder -zentrum empfohlen.

A form for filling out the shipping label. It includes instructions for 'Blutropfen' (Blood drops) and 'Blood spots', and fields for 'Name' (Vorname, First name, Geburtsdatum, Date of birth) and 'Datum Blutentnahme' (Date of blood collection). It also has a section for 'Einsender: Stempel oder Aufkleber' (Sender: stamp or label) and 'Sender: stamp or label'.

Screening-Labor Hannover
Postfach 91 10 09
30430 Hannover
Tel.: 05108-92163-0
Fax: 05108-92163-19

Copyright 2020 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben dem Screening-Labor Hannover vorbehalten. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, beim Screening-Labor Hannover. Bei Fragen oder für zusätzliche Informationen wenden Sie sich bitte an das Labor.

Gestaltung: NF.DESIGN / Nina Fischer